

So schnell und einfach
kann der Setwechsel sein!



Kappe abschrauben

1



Kanüle stechen

...und 2-3 Sekunden festdrücken

2



360° an- und
abkoppelbar!

Katheter ankoppeln

3

Bestellinformation (1VE=10 Stück)

Bestellnr.	PZN	Beschreibung	Schlauch- volumen (ml)
21-7220-24	10204318	Cleo® 90 Infusionsset, 6mm Nadel- 60cm Katheter	0,002
21-7221-24	10204301	Cleo® 90 Infusionsset, 6mm Nadel- 80cm Katheter	0,002
21-7222-24	10204347	Cleo® 90 Infusionsset, 6mm Nadel- 110cm Katheter	0,002
21-7230-24	10204324	Cleo® 90 Infusionsset, 9mm Nadel- 60cm Katheter	0,003
21-7231-24	10204330	Cleo® 90 Infusionsset, 9mm Nadel- 80cm Katheter	0,003
21-7232-24	10204353	Cleo® 90 Infusionsset, 9mm Nadel- 110cm Katheter	0,003

All-in-one:

Das patentierte Gehäuse beinhaltet Kanüle, Einführhilfe und Klebefläche. Nach Einführen der Kanüle wird die Nadel automatisch eingezogen und Stichverletzungen sind somit unmöglich.

Easy:

Sie bestimmen die Einführ-Geschwindigkeit!

Hypoallergene Klebefläche:


Gut klebend, lässt die Haut atmen, wasserabweisend - mit integrierter Abziehlasche

Flexibel:

Der abgerundete, flache Konnektor ist 360° an- und abkoppelbar.

Standard Luer-Lock:

Der Luer-Lock ist mit fast allen Pumpenmodellen kompatibel.

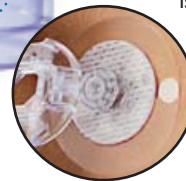

Hersteller:

smiths medical

bringing technology to life

www.smith-medical.com

cleo⁹⁰

infusion set

Erhältlich bei:



TMH MEDIZINHANDEL OHG

Helene-Kropp-Str. 1
47166 Duisburg

Fon: +49 (0)203-47 97 21-0

Fax: +49 (0)203-47 97 21-88

E-Mail: info@tmh-ohg.de

www.tmh-ohg.de