


Vor dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Packungsbeilage aufmerksam durchlesen und zum



HINWEISE FÜR DEN ORDNUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH



- Der **CRONOJET 50** wurde **ausschließlich** für das Aufziehen von crn® **CRONO® Réserveir** Spritzen **50 ml** mittels belüftetem Spike entwickelt (es wird empfohlen, das Modell **MiniSpike-CRN®** mit flüssigkeitsabweisender Membran 3 µm zu verwenden).
- Der Gebrauch von **CRONOJET 50** mit anderen Vorrichtungen als crn® **CRONO® Réserveir 50-ml-Spritzen** kann sowohl die Beschädigung der Spritze als auch Schäden für den Benutzer hervorrufen.
- CANÈ S.p.A. übernimmt keine Haftung, sollte:
 - **CRONOJET 50** mit anderen Vorrichtungen verwendet werden;
 - **CRONOJET 50** mit einem anderen als dem Original-Réserveir verwendet werden;
 - **CRONOJET 50** für nicht vorgesehene Zwecke verwendet werden.

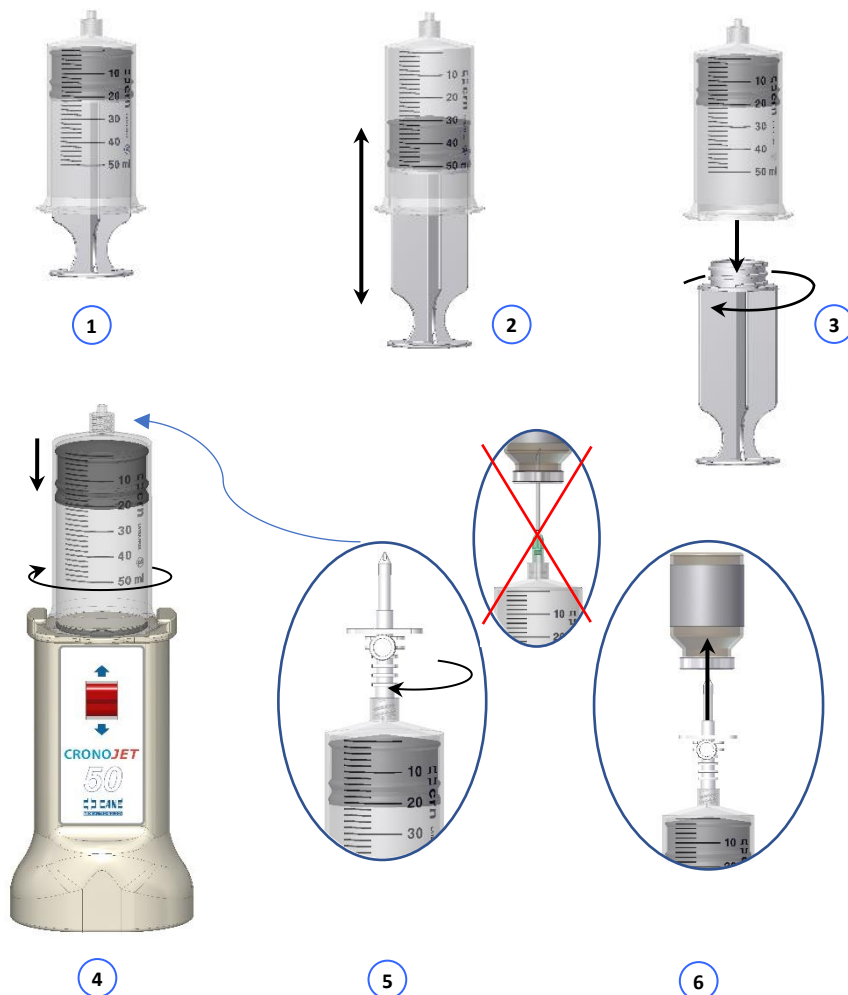

1. Spritze im Ausgangszustand.
 2. Bewegen Sie den Kolben hin und her, um die Innenwände der Spritze zu schmieren.
 3. Schrauben Sie den Kolben vom Gummizylinder ab. Dieser muss am Endanschlag sein.
 4. Setzen Sie die Spritze auf, indem Sie sie nach unten drücken und um 90° im/entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, sodass die Messskala zum Benutzer hin zeigt.
 5. Den belüfteten Spike auf die Spritze aufsetzen, um das Arzneimittel aufzuziehen
- KEINE Nadel verwenden.**
6. Den Spike in das Fläschchen einfügen.


Zum Ansaugen des Arzneimittels den Schalter (↓) betätigen und dabei die Vorrichtung in vertikaler Position halten, wie in der Abbildung 4 dargestellt.

HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen ist die Reinigungsfunktion (↑) pro Betätigung auf einige Sekunden begrenzt.



Es wird empfohlen, **CRONOJET50** NICHT für die Füllung von Infusionssets (Priming) zu verwenden

Das Gerät **CRONOJET50** darf NICHT verwendet werden, wenn das Infusionsset in den Patienten eingeführt ist.

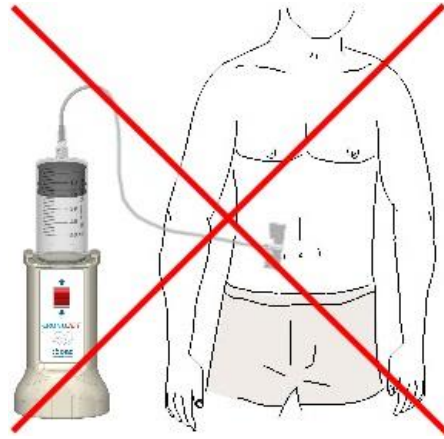


NEIN

Vor jedem Gebrauch ist das Gerät **CRONOJET50** auf Unversehrtheit und saubere Oberflächen zu prüfen.

CRONOJET50 darf nicht mit Aceton, Lösungs- oder Scheuermitteln gereinigt werden.

CRONOJET50 darf nicht in Reinigungslösung oder Wasser getaucht werden, um ein Eindringen von Flüssigkeit in die Spritzenhalterung zu verhindern.

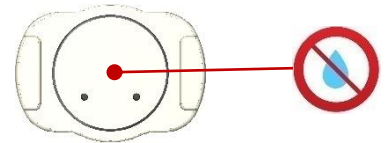

Nach dem Gebrauch muss **CRONOJET50** mit einem feuchten Tuch gereinigt und bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

CRONOJET50 ist von Wärmequellen (Heizkörpern, Herden, Öfen, UV-Strahlen) fernzuhalten.

CRONOJET50 darf weder in den Ofen noch in den Mikrowellenherd gelegt werden.

CRONOJET50 darf weder in den Kühlschrank noch in das Kühlfach gelegt werden.

CRONOJET50 darf nicht sterilisiert werden.

CRONOJET50 entspricht den Anforderungen der der Norm IEC 60601-1-2:2014 an die elektromagnetische Störfestigkeit; dennoch empfiehlt es sich, **CRONOJET50** nicht in der Nähe von Lebenserhaltungsgeräten zu verwenden.

Bei Nichtbeachtung der genannten Warnhinweise kann es zu Gerätestörungen mit mitunter schwerwiegenden Folgen für den Benutzer kommen.

Nach Ablauf der Betriebsdauer ist **CRONOJET50** ordnungsgemäß zu entsorgen (gemäß den Vorschriften zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten).

BATTERIEWECHSEL

Das Gerät benötigt zwei 1,5-V-Batterien vom Typ AA.

Es wird empfohlen, stets zwei neue Batterien vorrätig zu halten.

KEINE wiederaufladbaren Batterien verwenden!

Die Verwendung anderer Batterietypen kann zu einer Störung des Geräts führen.

Wird das Gerät längere Zeit nicht gebraucht, die Batterien entfernen.

Bei unzureichender Saugleistung die Batterien austauschen.

Für den Batteriewechsel den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Geräts durch Drücken auf die Lasche öffnen.


Die auszutauschenden Batterien herausnehmen.

Die neuen Batterien einlegen, dabei auf die richtige Polarität achten.

Das Etikett am Boden des Fachs zeigt die korrekte Polarität und die Seriennummer der Vorrichtung an

Den Batteriefachdeckel wieder schließen, bis er hörbar einrastet.

Bei mangelnder Funktionstüchtigkeit der Vorrichtung das Reservoir unter Verwendung des mitgelieferten Kolbens oder des **CRONOFILL** (sofern verfügbar) füllen.

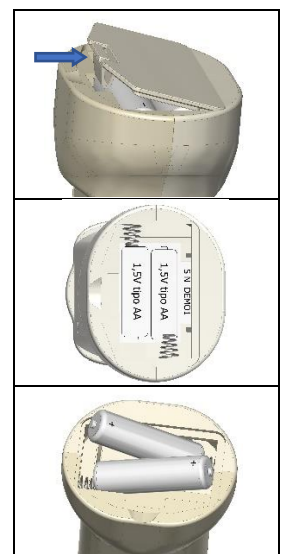

Canè S.p.A. bietet eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler des Produkts.



CANÈ S.p.A.
Via Cuorgnè 42/a
10098 Rivoli (TO) – Italy
www.canespa.it

