


CRONOJET

100

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für mögliche zukünftige Auskünfte auf

Batteriefach

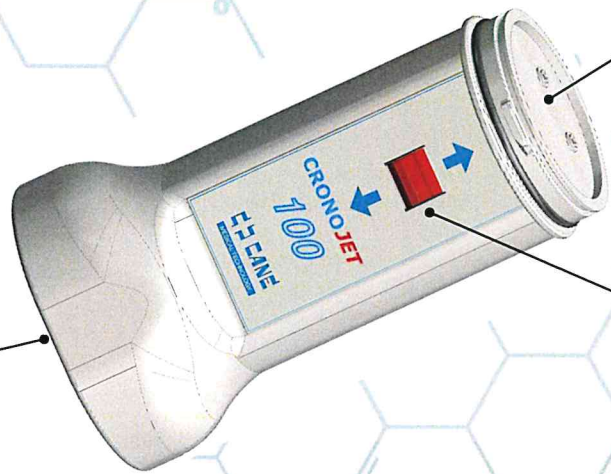

Spritzenhalter

Hebelschalter




IFU/11/DE/REV.0 02-2019

ANMERKUNGEN ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH



- Der **CRONOJET 100** wurde **ausschließlich** zum Befüllen der Spritzen CRN® CRONO® Réservoir 100 ml unter Verwendung eines belüfteten Spikes entworfen (wir empfehlen die Verwendung des Modells **MiniSpike-CRN®** mit hydrophober Membran 3 µm).
- Die Verwendung des **CRONOJET 100** auf anderen Geräten als CRN® CRONO® Réservoir 100 ml kann sowohl der Spritze als auch dem Benutzer Schaden zufügen
- CANE S.p.A. gilt als von jeder Haftung befreit, wenn:
 - der **CRONOJET 100** auf anderen Geräten verwendet wird;
 - der **CRONOJET 100** nicht mit Original-Vorratsbehältern verwendet wird.
 - der **CRONOJET 100** für Zwecke verwendet wird, für die er nicht vorgesehen ist.

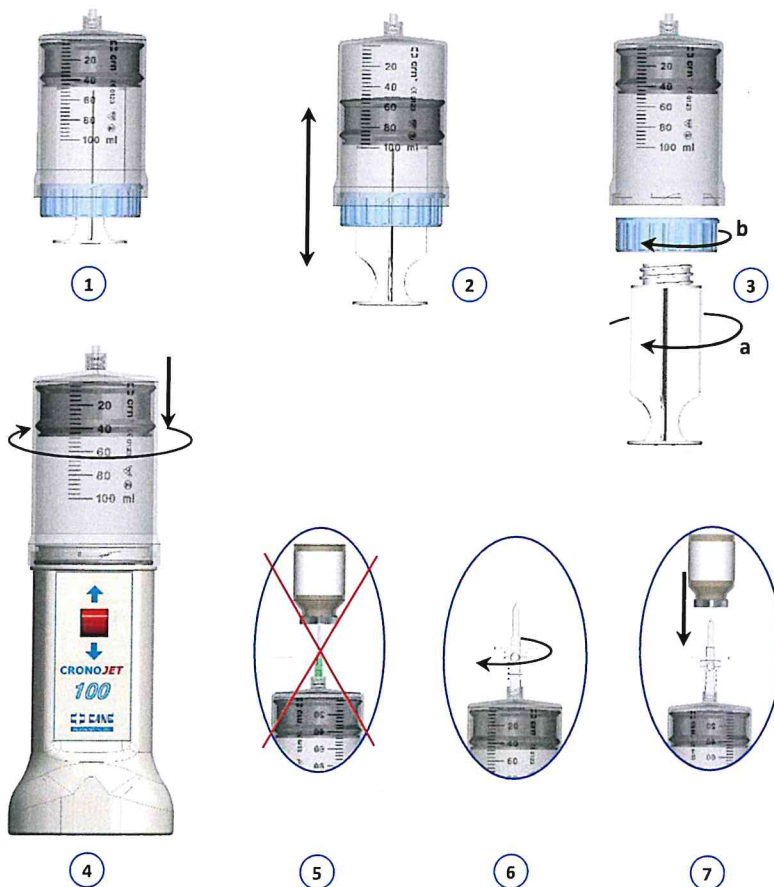

1. Spritze im Ausgangszustand.

2. Schieben Sie den Stab, um die Innenwände der Spritze zu schmieren.

3. **Positionieren** Sie den Gummikolben am Ende des Hubs wie in Abbildung 3 gezeigt. Schrauben Sie den Stab (a) ab, um ihn vom Kolben zu trennen, und schrauben Sie dann den p-Stop (b) von der Spritze ab.

4. **Setzen** Sie die Spritze ein, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drücken und drehen, um die Stufenskala in Richtung des Bedieners zu halten.


5. **Verwenden** Sie **NICHT** die Nadel!

6. **Setzen** Sie den belüfteten Spike an der Spritze ein, um das Medikament anzusaugen

7. **Stecken** Sie den Spike in die Flasche.


HINWEISE

- **Halten** Sie das Gerät **senkrecht** wie in Abbildung 4;
- **saugen** Sie das Medikament an, indem Sie den Schalter (↓) nach unten betätigen;
- während der Abfüllphase darf das Volumen des zu verwendenden Medikaments nicht überschritten werden; überschüssiges Arzneimittel sollte nicht in die Flasche zurückgegeben werden, um eine Fehlfunktion des belüfteten Spikes zu vermeiden.

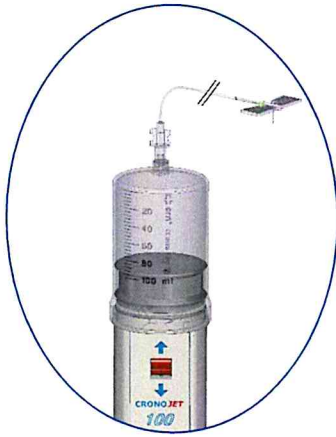


Schließen Sie das Infusions-Set an den Vorratsbehälter an und betätigen Sie den Schalter (↑) nach oben, um die Restluft zu entfernen und ein versehentliches Verschütten von Medikamenten zu vermeiden.

Während dieses Vorgangs darf das Gerät **AUF KEINEN FALL** mit der Infusionsstelle verbunden sein.

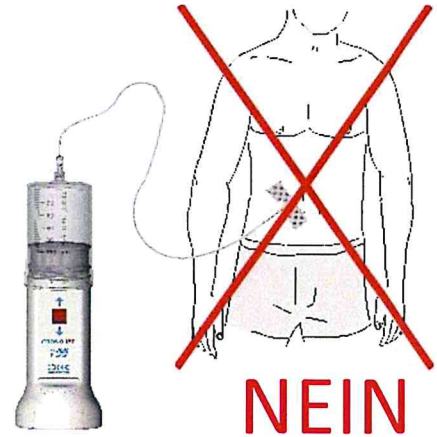

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des **CRONOJET 100** seine Unversehrtheit und die Sauberkeit der Oberfläche.

Reinigen Sie den **CRONOJET 100** nicht mit Aceton, Lösungsmitteln oder Schleifmitteln. Tauchen Sie den **CRONOJET 100** nicht in Reinigungslösungen oder Wasser, um das Eindringen von Flüssigkeiten in den Spritzenhalter zu vermeiden.

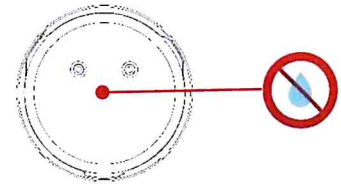

Nach dem Gebrauch muss der **CRONOJET 100** mit einem Reinigungstuch gereinigt und bei Raumtemperatur trocken gelagert werden.

Der **CRONOJET 100** muss von Wärmequellen (Heizkörpern, Kochplatten, Heizgeräten, UV-Strahlen) ferngehalten werden.

Der **CRONOJET 100** darf nicht in den Backofen oder in eine Mikrowelle gestellt werden.

Der **CRONOJET 100** darf nicht in einen Kühl- oder Gefrierschrank gestellt werden.

Der **CRONOJET 100** darf nicht sterilisiert werden.

Der **CRONOJET 100** erfüllt die Anforderungen der IEC 60601-1-2: 2014 bezüglich elektromagnetischer Emissionen; allerdings wird empfohlen, den **CRONOJET 100** in der Nähe von lebenserhaltenden Geräten zu verwenden.

Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen kann es zu Fehlfunktionen des Geräts mit schwerwiegenden Folgen für den Benutzer kommen.

Am Ende seiner Lebensdauer muss der **CRONOJET 100** ordnungsgemäß entsorgt werden (gemäß den Regeln für die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten).

BATTERIEWECHSEL

Das Gerät verwendet 2 x 1,5 V AA-Batterien.

Es wird empfohlen, immer 2 neue Ersatzbatterien bereit zu halten.

Verwenden Sie **KEINE** wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

Die Verwendung anderer Batterietypen kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sind die Batterien zu entfernen.

Wenn die Saugwirkung unzureichend ist, sind die Batterien auszutauschen.

Öffnen Sie zum Austauschen die Klappe an der Unterseite des Geräts, indem Sie den Hebel drücken.


Entfernen Sie die zu ersetzenden Batterien.

Legen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität.

Das Etikett an der Unterseite des Fachs zeigt die richtige Polarität an.

Schließen Sie die Klappe, und achten Sie darauf, dass das Einrastgeräusch zu hören ist.

Bei Funktionsstörung des Gerätes befüllt man den Vorratsbehälter unter Verwendung des mitgelieferten Stabs oder alternativ mit dem **CRONOFILL** (falls verfügbar).

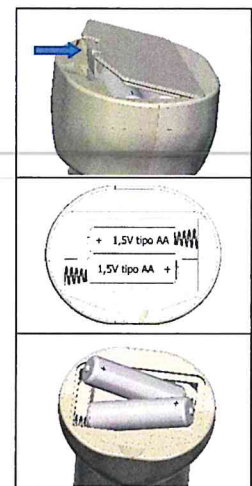

Canè S.p.A. garantiert, dass das Produkt keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist und zwar für die Dauer von 2 (ZWEI) JAHREN ab dem Original-Kaufdatum.



CANÈ S.p.A.
Via Cuornè 42/a
10098 Rivoli (TO) – Italien
www.canespa.it

